

Totes les mostres s'enviaran al laboratori **perfectament envasades i identificades**.
Es recomana prendre la mostra dels animals que presentin simptomatologia i si es possible que no estiguin medicats, el més ràpid possible des de la mort o sacrifici de l'animal i amb la màxima higiene possible.

Adjuntar sempre **la fulla de sol·licitud** d'anàlisi, disponible també a la web, amb la màxima informació possible (client, explotació, contacte, anàlisi sol·licitat).

Les mostres han d'enviar-se en les millor condicions de manteniment depenent de cada tipus d'estudi (**refrigeració, congelació...**) i realitzar l'enviament el més aviat possible (**24-48h**).

Per qualsevol tipus de mostra que no estigui descrita a continuació, recomanem que es fiquin en contacte amb el laboratori.

Sèrum

- Recomanacions per a la presa de mostres; punció en vena i recollida en condicions d'esterilitat. Quan sigui necessari la remissió de mostres de sèrum, el tub ple de sang se deixarà en repòs a temperatura ambient fins la retracció del coàgul.
- Es recomana l'ús de tubs estèrils sense anticoagulant.
- El volum mínim recomanat és de 1mL.
- És necessari evitar-la congelació de les mostres que encara continguin el coàgul, se conservaran i enviaran refrigerades.

San sencera

- Recomanacions per a la presa de mostres; punció en vena recollida en condicions d'esterilitat. Voltejar el tub un parell de vegades per facilitar la barreja amb el anticoagulant.
- Es recomana l'ús de tubs estèrils amb EDTA per proves específiques tals com: Vit C, hemograma ... (consultar amb el laboratori).
- El volum mínim recomanat és de 3 mL.
- És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i enviaran refrigerades.

Semen pur / Dosis seminal

- Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres se recolliran amb guants d'un sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació.
- Ús de material estèril pera realitzar la presa de mostra.
- Volum mínim de mostra 50 ml.
- Transport ràpid, refrigerat 6-8°C i protegit dels cops per estudis microbiològics.
- Transport ràpid, refrigerat 15-20°C i protegit dels cops per seminogrames.

Cadàvers / Visceres

- Recomanacions per a la presa de mostres: evitar l'enviament de mostres autolítiques. Quan l'enviament no pugui realitzar-se de manera immediata o per animals grans, seria recomanable realitzar la necròpsia en camp i la selecció de les vísceres, anotant les lesions observades. Les mostres sempre han de ser d'animals No medicats.
- Les mostres s'enviaran en envasos estèrils i perfectament precintats.

- És imprescindible evitar barrejar vísceres, cada òrgan o mostra ha de tenir el seu propi envàs.
- Enviar mostres representatives, senceres, no porcions i en perfecte estat de conservació.
- Quantitat mínima recomanada: en funció de les possibilitats s'enviaran les vísceres senceres o prendre mostres dels òrgans lesionats.
- És necessari evitar la congelació de les mostres se conservaran i enviaran refrigerades 6-8°C.

Calostre/ Sèrum làctic

- Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres cal recollir-les amb guants d'un sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació. Netejar el mugró i desestimar els primers mil·lilitres de llet.
- Es recomana l'ús de tubs estèrils i lliures de qualsevol tipus de conservants.
- El volum mínim recomanat és de 6-4 ml.
- És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i evitaran refrigerades 6-8 °C.

Orina

- Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres se recolliran amb guants d'un sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació. Netejar la zona de mostreig i desestimar els primers mil·lilitres de orina.
- És recomana l'ús d'envasos estèrils entre 100-150ml per tal de garantir un volum de mostra suficient.
- Volum mínim de mostra 20ml.
- És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i enviaran refrigerades 6-8°C.